



6612 P-NfLc

Plasma neurofilament, lätt kedja

BEGÄRAN OM UNDERSÖKNING

Personuppgifter	Patientens namn	Personnummer
	Provtagningsdatum	Provkod (mottagaren fyller i)
Provsvars- information	Beställare av undersökningen	
	Svarsadress	
	Faktureringsadress (om annan än svarsadress)	
Anvisningar om avsändning av provet	<ul style="list-style-type: none"> • Prov: EDTA-plasma, volym ≥ 1 ml. • Provet tas i K2-EDTA-rör och plasma avskiljes till 2 ml polypropylenrör. • På provröret ska finnas patientens namn, personnummer och provtagningsdatumet. • Provet förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp och skickas vid rumstemperatur inom 2 dagar av provtagning. Vid längre förvaringstider förvaras och skickas provet fryst minst -20°C. Prov ska inte skickas på fredagar, men avskilt plasma kan förvaras fryst och skickas till laboratoriet på nästa vardag. • Denna blankett finns även på www.uef.fi/aivobiomarkkeritutkimukset • Polypropylenrör kan beställas kostnadsfritt från alzheimemarkkeri@uef.fi 	
Svarstid	Svaret skickas senast inom tre veckor från att provet mottagits på laboratoriet.	
Provet sänds till:	Itä-Suomen Yliopisto Mediteknia Aivotutkimusyksikkö Biomarkkerilaboratorio PL 1627 (Yliopistonrinne 3) 70211 Kuopio	
För mer information	Laboratoriet tel. +358 400 648632, alzheimemarkkeri@uef.fi Sanna-Kaisa Herukka, ML, FD, forskare, tel: +358 40 5486247, sanna-kaisa.herukka@uef.fi	