



## 6820 P-Tau-217 Plasman pTau217 TUTKIMUSPYYNTÖ

Henkilötiedot	Potilaan nimi	Henkilötunnus
	Näytteenottopäivämäärä	Tutkimuskoodi (vastaanottaja täyttää)
Tutkimuksen tilaaja	Tutkimuksen tilaaja	
	Vastausosoite	
	Laskutusosoite (jos eri kuin vastausosoite)	
Näytteen ottamista ja lähettämistä koskevat ohjeet	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Näyte: EDTA-plasma, tilavuus <math>\geq</math> 1 ml.</b> Näyte otetaan K2-EDTA-putkeen ja plasma erotellaan lähetysputkeen (esim. 4 ml polypropyleeniputki).</li><li>• Lähetysputken päälle henkilön nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä.</li><li>• Näyte voidaan säilyttää huoneenlämmössä tai +4°C ja lähettää huoneenlämpöisenä vuorokauden (24 h) sisällä näytteenotosta. <b>Vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys pakastettuna vähintään -20°C.</b></li><li>• <b>Näytettä ei saa lähettää perjantaisin</b>, mutta eroteltu näyte voidaan pakastaa ja lähettää tutkimuslaboratorioon seuraavana arkipäivänä.</li><li>• Voimakkaasti hemolysoituneita näytteitä ei analysoida.</li><li>• Tutkimuspyyntölomakkeita voi pyytää laboratoriosta, <a href="mailto:alzheimermarkkeri@uef.fi">alzheimermarkkeri@uef.fi</a></li><li>• Lisätietoa osoitteesta <a href="http://www.uef.fi/aivobiomarkkeritutkimukset">www.uef.fi/aivobiomarkkeritutkimukset</a></li></ul>	
Vastausaika	Vastausaika on neljä viikkoa näytteen saapumisesta.	
Näytteen postitusosoite	Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Aivotutkimusyksikkö Biomarkkerilaboratorio PL 1627 (Yliopistonrinne 3) 70211 Kuopio	
Lisätietoja	Laboratorio puh. 0400 648632, <a href="mailto:alzheimermarkkeri@uef.fi">alzheimermarkkeri@uef.fi</a> Sanna-Kaisa Herukka, LL, FT, tutkimusjohtaja, <a href="mailto:sanna-kaisa.herukka@uef.fi">sanna-kaisa.herukka@uef.fi</a>	