



Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiaineet TUTKIMUSPYYNTÖ

Henkilötiedot	Potilaan nimi	Henkilötunnus
	Näytteenottopäivämäärä	<input type="checkbox"/> CJD-epäily
	Tutkimuskoodi (vastaanottaja täyttää)	
Pyydetty tutkimus	Kolmen merkkiaineen yhdistelmä: <input type="checkbox"/> 4809 Li-FosTau, <input type="checkbox"/> 4810 Li-Tau ja <input type="checkbox"/> 4811 Li-BAm42 Yksittäiset merkkiaineet tai kahden merkkiaineen yhdistelmä: <input type="checkbox"/> 4811 Li-BAm42 <input type="checkbox"/> 4810 Li-Tau <input type="checkbox"/> 4809 Li-FosTau	
Tutkimuksen tilaaja	Tutkimuksen tilaaja	
	Vastausosoite	
	Laskutusosoite (jos eri kuin vastausosoite)	
Näytteen ottamista ja lähettämistä koskevat ohjeet	<ul style="list-style-type: none"> Näytteeksi otetaan selkäydinnestettä 2.5 ml merkkiviivaan asti Sarstedt CSF valepohjaputkeen (polypropyleeni, REF 63.614.625). Näyteputken päälle henkilön nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä. Mikäli näyte lähetetään väärässä putkessa tai jos näytettä on alle 2.0 ml, siitä mitataan vain Tau ja FosTau. Näyte säilytetään +4°C ja lähetetään huoneenlämpöisenä vuorokauden (24 h) sisällä näytteenotosta. Vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys +4°C (max 5 vrk) tai pakastettuna vähintään -20°C (max 6 kk). Ei postitusta PERJANTAISIN. Tutkimuspyyntölomakkeita voi tulostaa osoitteesta www.uef.fi/aivobiomarkeritutkimukset Näyteputkia voi tilata veloituksetta osoitteesta alzheimermarkkeri@uef.fi 	
Vastausaika	<ul style="list-style-type: none"> Lähetämme vastauksen viimeistään kuukauden kuluttua näytteen saapumisesta tutkimuslaboratorioon. 	
Näytteen postitusosoite	Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Aivotutkimusyksikkö Biomarkerilaboratorio PL 1627 (Yliopistonrinne 3) 70211 Kuopio	
Lisätietoja	Laboratorio puh. 0400 648632, alzheimermarkkeri@uef.fi Sanna-Kaisa Herukka, LL, FT, tutkimusjohtaja, sanna-kaisa.herukka@uef.fi	